

# AllergyScreen – Procédure du test

Préparation	Rincer la bandelette réactive avec la solution tampon, secouer la cuvette à réactions
<b>1. Incubation</b>	<b>0,25 ml de sérum incuber pendant 45 min. sur le mélangeur</b>
Rincer	Rincer avec la solution tampon, 6-7x remplir et agiter 10-15s, secouer en tapotant
<b>2. Incubation</b>	<b>5-6 gtt. de solution de détection (bouchon vissé blanc), incuber pendant 45 min. sur le mélangeur</b>
Rincer	Rincer avec la solution tampon, 6-7x remplir et agiter 10-15s, secouer en tapotant
<b>3. Incubation</b>	<b>5-6 gtt. de solution de conjugué (bouchon vissé rouge), incuber pendant 20 min. sur le mélangeur</b>
Rincer	Rincer avec la solution tampon, 9-10x remplir et agiter 10-15s, secouer en tapotant
<b>4. Incubation</b>	<b>5-6 gtt. de solution de coloration (flacon noir), incuber pendant 20 min. dans l'obscurité sur le mélangeur, adapter le temps d'incubation à la température ambiante si nécessaire (voir mode d'emploi)</b>
Rincer	Rincer avec <i>de l'eau courante</i> , secouer en tapotant
<b>Évaluation</b>	<b>Faire sécher la bandelette réactive et lire les résultats</b>

Pour plus d'information, voir mode d'emploi du test

**Bencard  
Diagnostics**

Distribution en Suisse:  
Bencard SA  
8606 Greifensee  
Tel. 044 942 00 13  
bencard.ch

Pour plus d'information, voir mode d'emploi du test

08/2020PB

**Bencard**  
**Diagnos**  

---

Distribution en Suisse:  
Bencard SA  
8606 Greifensee  
Tel. 044 942 00 13  
[bencard.ch](http://bencard.ch)