

# AllergyScreen Testanleitung

Vorbereitung	Teststreifen mit Waschpuffer abspülen, Reaktionswanne ausklopfen
<b>1. Inkubation</b>	<b>0,25 ml Serum, 45 Min. auf dem Schüttler inkubieren</b>
Waschen	mit Waschpuffer abspülen, 6-7x füllen und 10-15s schwenken, ausklopfen
<b>2. Inkubation</b>	<b>5-6 Tropfen Detektorlösung (weisse Verschlusskappe), 45 Min. auf dem Schüttler inkubieren</b>
Waschen	mit Waschpuffer abspülen, 6-7x füllen und 10-15s schwenken, ausklopfen
<b>3. Inkubation</b>	<b>5-6 Tropfen Konjugatlösung (rote Verschlusskappe), 20 Min. auf dem Schüttler inkubieren</b>
Waschen	mit Waschpuffer abspülen, 9-10x füllen und 10-15s schwenken, ausklopfen
<b>4. Inkubation</b>	<b>5-6 Tropfen Farbstofflösung (schwarzes Fläschchen), 20 Min. im Dunkeln auf dem Schüttler inkubieren, Zeit falls nötig an Raumtemperatur anpassen (siehe Packungsbeilage)</b>
Waschen	mit <i>Leitungswasser</i> abspülen, ausklopfen
<b>Auswertung</b>	<b>Teststreifen trocknen und auswerten</b>

Ausführlichere Information: siehe der Packung beiliegende Testanleitung

**Bencard  
Diagnostics**

Vertrieb Schweiz:  
Bencard AG  
8606 Greifensee  
Tel. 044 / 942 00 13  
bencard.ch